

Configurazione di Apple Health nell'app Allurion iOS


Ora è disponibile l'app Allurion iOS con passi, sonno ed esercizio sincronizzati dall'Apple Health. Ciò significa che gli utenti che desiderano sincronizzare questi dati da un Apple Watch, iPhone o altro dispositivo o app, possono visualizzare i passi, il sonno e i minuti di esercizio nella nostra app.

Ci sono due modi per impostare questa opzione:


1. Durante il processo di installazione dell'app Allurion e durante la configurazione dell'account.
2. Nelle Impostazioni utente dell'iPhone o iPad iOS.

Configurazione durante l'installazione dell'app Allurion e dell'impostazione dell'account

1. Quando un utente installa l'app, verrà visualizzata questa schermata:

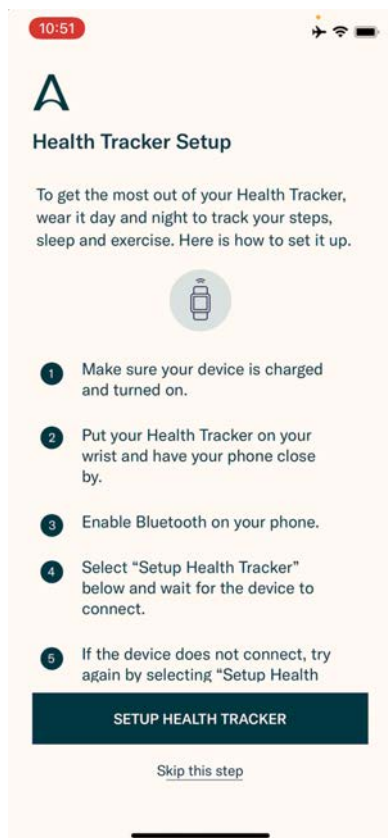

2. Se l'utente desidera utilizzare l'Allurion Health Tracker, selezionare "Configura Health Tracker". Altrimenti selezionare "Salta questo passo".
3. L'utente vedrà questa schermata in seguito. Selezionare "Attiva tutte le categorie" e quindi "Consenti".

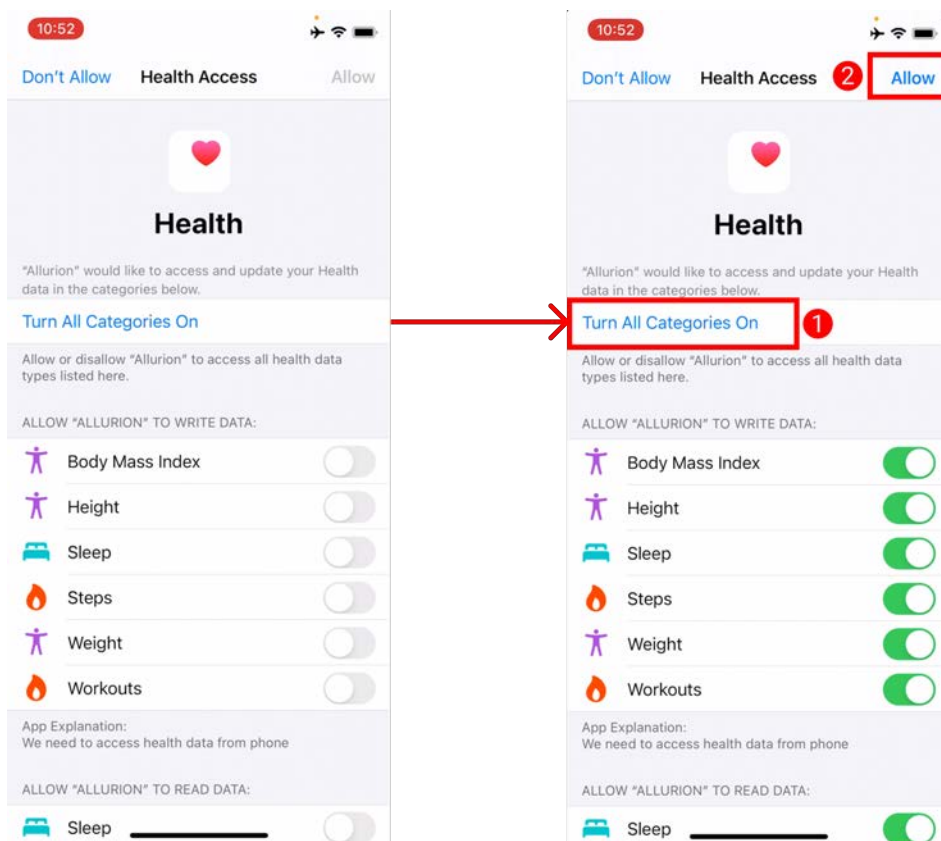

4. Ora i dati dei passi, del sonno e dell'esercizio fisico saranno raccolti dall'Apple Health dell'utente e visualizzati direttamente nell'App Allurion e in Allurion Insights.

Configurazione utilizzando le impostazioni iOS

Per impostare la sincronizzazione con Apple Health dopo l'installazione dell'app:

1. Vai a "Impostazioni"
2. Selezionare "Health"
3. Selezionare "Accesso ai dati e dispositivi"
4. Selezionare "Allurion"
5. Selezionare "Attiva tutte le categorie"

